

NÁVOD K OBSLUZE

Model AC117

Monitor pohybu a zvuku



OBSAH

! UPOZORNĚNÍ	2
Příprava uvedení do provozu.....	3
KROK 1 – Nabijte rodičovskou jednotku (10 hodin)	4
KROK 2 – Umístění senzorové podložky	5
KROK 3 – Nastavení dětské jednotky	6
KROK 4 – Zapnutí zařízení	7
KROK 5 – Testování a seznámení s monitorem	8
KROK 6 – Další funkce	14
Řešení potíží	15
Záruční podmínky	19
Technické specifikace	19

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UCHOVEJTE PŘÍRUČKU PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

PŘED MONTÁŽÍ A POUŽÍVÁNÍM VÝROBKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE UPOZORNĚNÍ A POKYNY.

IGNOROVÁNÍ VAROVÁNÍ A POKYNŮ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ PORANĚNÍ NEBO SMRT NEBO POŠKOZENÍ PRODUKTU.

SENZOROVÁ PODLOŽKA NESMÍ BÝT POUŽÍVÁNA DOSPĚLÝMI NEBO DĚTMI STARŠÍMI 24 MĚSÍCŮ.

NEPOUŽÍVEJTE SENZOROVOU PODLOŽKU KE KONTROLE, ZDA JE DÍTĚ V KOLĚBCE.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Montáž provádí dospělý.

Při montáži udržujte malé části mimo dosah dětí.

Angelcare® je hrdý na všechny své produkty.

Pokud jste nešťastní nebo máte dotazy:

USA a Canada: angelcare@cdccinc.ca

EU: kontaktujte svého lokálního distributora podpora@angelcare.cz.

⚠ UPOZORNĚNÍ



⚠ VAROVÁNÍ – Nebezpečí uškrcení – Děti se mohou uškrtit volnými kabely.

• DĚTSKOU JEDNOTKU a kabely adaptéru udržujte mimo dosah dětí (alespoň 1 metr).. • NIKDY nepoužívejte prodlužovací kabely pro adaptéry. Používejte pouze dodávané adaptéry. • Produkt není hračka. Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

1. Výrobek nenahrazuje zodpovědný dohled dospělých. Výrobek je navržen tak, aby pomáhal na dítě dohlížet. Abyste však zajistili úplnou bezpečnost vašeho dítěte, musíte kromě použití přístroje, věnovat osobní pozornost vašemu dítěti. Dohled nad předčasně narozenými, nebo ohroženými dětmi, je prováděn vždy způsobem předepsaným zdravotnickým odborníkem. Tento přístroj není zdravotnické zařízení pro prevenci SIDS.

2. Nenechávejte volné konce adaptéru připojeného k zásuvce.

3. VŽDY se ujistěte, že vysílač a přijímač fungují správně a že jsou v dosahu. Před prvním použitím zkontrolujte přístroj, pravidelně kontrolujte a zkontrolujte jeho funkci změnou Umístění dětské jednotky.

4. VŽDY a okamžitě zkontrolujte své dítě, když zazní alarm.

5. NEPOUŽÍVEJTE přístroj v blízkosti vody (např. vana, dřez, atd.).



OPATRNĚ!
**RISKUJETE ZÁSAH ELEKTRINOU
NEOTVÍRÁJTE**
NEVYSTAVUJTE DEŠTI ANI VLHKOSTI



6. Udržujte zařízení mimo dosah zdrojů tepla (např. trouby, radiátory, atd.).

7. VŽDY umístěte dětskou i rodičovskou jednotku na rovném povrchu ve svléce poloze a umožněte jim ventilaci. Nepokládejte jednotky na sedáčky, polštáře, postele apod., které mohou bránit ventilaci a přehřátí jednotky.

8. Tento monitor používá k přenosu signálů veřejná frekvence. Rodičovská jednotka může zachytit signály nebo rušení od ostatních chůviček ve vaší oblasti. Váš monitor může dokonce zvedenout i jiné domácnosti. Chcete-li chránit vaše soukromí, ujistěte se, že obě zařízení jsou vypnuty, když je nepoužíváte. Pokud dojde k rušení, změňte kanál na obou jednotkách.

9. Výrobek obsahuje malé části. Montáž provádí dospělá osoba. opatrně nebalte a Nemontujte výrobek a udržujte malé části mimo dosah dětí.

10. Přístroj může být používán při pokojové teplotě mezi 10 ° C a 40 ° C.

⚠ UPOZORNĚNÍ NA BATERIE

11. VŽDY mějte baterie mimo dosah dětí. Rodičovská jednotka používá vyměnitelnou alkalickou baterii. Snímací podložka obsahuje vyměnitelnou Lithiovou baterii. Náhradní baterie používejte pouze doporučené společnosti Angelcare viz Technické specifikace. Nebezpečí výbuchu, pokud je použita špatná baterie, nebo je nesprávně vyměněna. Informace o správné instalaci baterie naleznete v Uživatelské příručce. Nezakrývejte napájecí svorky. NEKOMBIJTE staré a nové baterie. Koflisková baterie představuje malou součástku a nebezpečí udušení. Držte mimo dosah dětí.

12. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

12.1 Dodržujte varování - Je třeba dodržovat všechna upozornění na výrobku a v uživatelské příručce.

12.2 Postupujte podle pokynů – musí být dodrženy všechny pokyny pro provoz a použití.

12.3 Voda a vlhkost - Nevystavujte přístroj vodě. Neumísťujte baterie do blízkosti van, lahvů, dřezů, mytí nebo jakéhokoli vlhkého prostředí, jako je bazén. Dávajte pozor, aby se stříkající kapalina nedostala přes otvory do jednotky nebo senzorové desky.

12.4 Čištění - Před čištěním odpojte jednotku. Neponořujte žádné části přístroje do vody. Čistěte pouze suchými hadříky.

12.5 Větrání - Nezavírejte větrací otvory. Dbejte na to, aby byl výrobek během používání řádně větrán. Dětskou jednotku ani rodičovskou jednotku nezakrývejte žádným předmětem (např. přikrývkami). Nevkládejte zařízení do zásuvky nebo na jakékoli místo, které má tlumit zvuk, ale brání volnému proudění vzduchu.

12.6 Zdroje tepla - Nepokládejte na zdroj tepla, jako je radiátor, topení, trouba, televize nebo jiné zařízení, které vyzařuje teplo (např. zesilovač). Teplo může poškodit kryt nebo elektrické části.

12.7 Chraňte kabely – Ujistěte se, že senzor a kabely adaptéru nejsou umístěny na kabelu, a že se nedotýkají předmětů viz výše, nebo nejsou skřípnuty mezi nábytkem apod.. Napájecí kabely musí být vedeny takovým způsobem, aby se minimalizovala možnost jejich poškození, nebo aby byly vedeny nad/pod nábytkem. Zvláštní pozornost musí být věnována místům, kde vodiče opouštějí výrobek. Zařízení umístěte do blízkosti zásuvky se snadným přístupem. Připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce, která je nejlépe k vašemu zařízení a lze ji snadno dosáhnout. Chcete-li se odpojit od sítě, odpojte adaptér.

12.8 Příslušenství – Používejte pouze příslušenství dodávané výrobcem.

12.9 Nepokládejte výrobek na nestabilní plochu Výrobek může spadnout, způsobit vážná poranění dětí, nebo dospělých a vážně poškodit zařízení. Používejte pouze stativ, konzole a držáky doporučené výrobcem nebo prodávané s výrobkem. Instalace výrobku musí být vždy provedena v souladu s pokyny výrobce.

12.10 Odpojte zařízení během bouřky, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.

12.11 Údržba – Nepokoušejte se výrobek opravovat sami, protože otevření nebo sejmout víka (kromě dveří baterie) vás může vystavit nebezpečnému elektrickému napětí, nebo jinému nebezpečí.

12.12 Náhradní díly - Používejte pouze náhradní díl, který je totožný s výrobcem, nebo s originálním konstrukčním dílem. Použití neoficiálních náhradních dílů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem a jiná nebezpečí.

12.13 Použití – Tento přístroj je určen pouze pro podporu práce rodičů. Nenahrazuje zodpovědný a přiměřený dohled dospělými osobami a neměl by být používán k jejich náhradě. Přístroj používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce.

12.14 Zdroje energie – Provozuje výrobek pouze ze zdroje napětí, který vyhovuje parametřům adaptéru. Obrátte se na prodejce nebo na místního poskytovatele napájení, pokud si nejste jisti napětím v elektrické síti.

12.15 Přetížení - Nepřetěžujte zásuvky ve zdi prodlužovacími kabely, nebo rozvodkami. Riskujete požár, nebo úraz elektrickým proudem.

12.16 Vniknutí předmětů a tekutin – Nikdy netlačte žádný předmět do výrobku mezerami v pouzdře, protože mohou ovlivnit nebezpečné napětové body, nebo mohou způsobit požár, nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte kapalinu.

12.17 Anténa – Minimální vzdálenost osob v okolí antény vysílače je 20 cm. Anténa nesmí být ztížena a nesmí být používána ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem..

12.18 Elektrické rušení - Ve volném prostoru nesmí být anténní systém umístěn v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí, nebo jiného zdroje elektromagnetického záření, nebo elektrických rozvodů.

12.19 Vibrace – Pokud je snímací podložka aktivní, nepoužívejte pohyblivou dětskou postýlku, ani jiné příslušenství pro dětské postýlky, které mohou způsobovat vibrace (kolotoče). Další zdroje vibrací mohou být ventilátory, pračky, hlasitá hudba apod. Tyto zdroje vibrací mohou ovlivňovat výkon vašeho monitoru Angelcare® a **poplach nebude znít, pokud bude systém nadále zachytávat jakýkoli jiný pohyb, než vašeho dítěte.** Před použitím monitoru se ujistěte, že všechny zdroje vibrací jsou vyloučeny.

12.20 Odstranit všechny zdroje vibrací při použití monitoringu pohybů dechu.

12.21 Falešné poplachy mohou mít několik příčin.

- Po odstranění dítěte z dětské postýlky nebyla Dětská jednotka vypnuta;
- Snímací podložka nebyla správně umístěna pod matrací. Ujistěte se, že je umístěna na plochem a pevném povrchu, logem Angelcare a natisknutím textem nahoru.
- Je také třeba nastavit úroveň citlivosti. Viz Uživatelská příručka Krok 4.3.

Vždy okamžitě Zkontrolujte své dítě, když uslyšíte poplach.

12.22 Pokud vaše dětská postýlka nemá pevné dno, stacionární, zcela plochou, pevnou rovinu, včetně pružin nebo lamel (rošt, špruše), umístěte pevnou vyrovnávací desku mezi základnu postýlky a Snímací podložku, abyste zajistili správnou činnost. Vyrovnávací deska musí být větší než plocha Snímací podložky. Tedy rozměry nejméně 33 x 33 cm a tloušťku 6 mm.

13. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ

13.1 Používejte pouze baterie typu a velikosti uvedené v uživatelské příručce. Nesprávné použití baterií může způsobit požár.

13.2 Před prvním použitím dobijte přiložené baterie pro Rodičovskou jednotku nepřetržitě 10 hodin, instalované v Rodičovské jednotce. Během dobíjení jednotku vypněte. Používejte pouze adaptér Angelcare dodávaný se zařízením.

13.3 Nepoužívejte adaptéry Angelcare s jiným zařízením.

13.4 Adaptér od dětské jednotky odpojujte pouze při její deaktivaci.

13.5 Nevzhazujte baterie do ohně, protože mohou explodovat.

13.6 Manipulujte s bateriemi tak, aby nedošlo ke zkratování kontaktů vodivými materiály, náramky, klíči apod.

13.7 VŽDY mějte baterie mimo dosah dětí.

13.8 Snímací podložka obsahuje vyměnitelnou Lithiovou baterii. Náhradní baterie používejte pouze doporučené společnosti Angelcare viz Technické specifikace.

13.9 Nebezpečí poškození, pokud je použita špatná baterie, nebo je nesprávně vyměněná. Informace o správné instalaci baterie naleznete v Uživatelské příručce.

13.10 Nezkraťte napájecí svorky.

13.11 NEKOMBINUJTE staré a nové baterie v Dětské jednotce.


13.12 Knoflíková baterie představuje malou součástku a nebezpečí udušení. Držte mimo dosah dětí.

13.13 Likvidujte baterie odpovědným způsobem podle Návodu k použití


13.14 Vyměňte baterie z jednotky, pokud produkt skladujete více než 30 dní, protože by mohlo dojít k úniku elektrolytu a poškození výrobku. **NEPOUŽÍVEJTE** tento výrobek, nebo baterie dodávané s tímto výrobkem, nebo určené pro použití s tímto výrobkem, v prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí a vyhněte se přímému slunečnímu záření

PŘÍPRAVA UVEDENÍ DO PROVOZU


PŘÍSLUŠENSTVÍ:

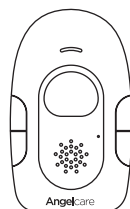


Rodičovská
jednotka

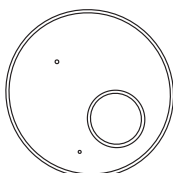

Dětská
jednotka

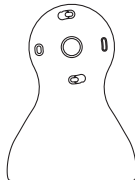

Stolní stojan Dětské
jednotky

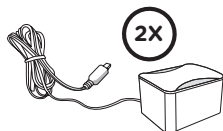

2 ks síťový adaptér
(pro Rodičovskou jednotku a Dětskou
jednotku)



2 ks dobíjecí baterie AAA
(pro Rodičovskou jednotku)




Bezdrátový snímač pohybu
* Vždy umístěte logo Angelcare směrem nahoru.*




CR3032 baterie pro
snímač pohybu

KROK 1 - NABIJTE RODIČOVSKOU JEDNOTKU (10 HODIN)

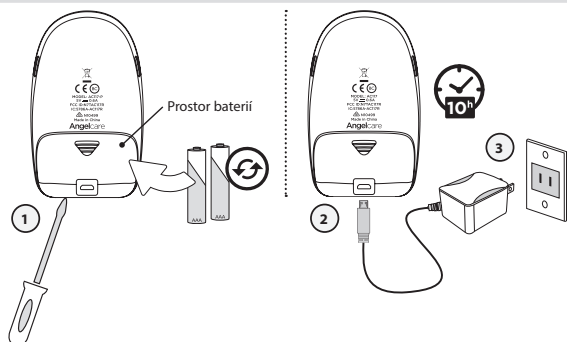

- 1) Sejměte kryt baterií na zadním panelu. Do přihrádky vložte přiložené dobíjecí baterie.
- 2) Připojte kabel USB k Rodičovské jednotce a napájecí adaptér do elektrické zásuvky.
- 3) Před použitím nejprve nabíjejte vypnutou jednotku **10 hodin nepřetržitě**.

RODIČOVSKÁ JEDNOTKA:

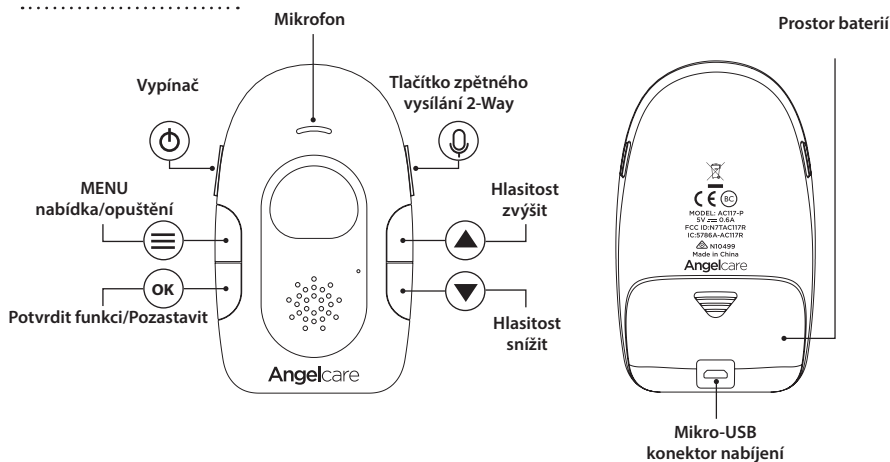

⚠ UPOZORNĚNÍ





- Dětskou jednotku umístěte mimo dosah dětí (nejméně 1 metr)
- Nikdy neprodlužujte kabel napájecího adaptéru
- Používejte pouze adaptéry dodané s přístrojem
- Produkt není hračka. Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály

KROK 2 - UMÍSTĚNÍ SENZOROVÉ PODLOŽKY

2.1 – NAPÁJENÍ SENZOROVÉ PODLOŽKY (MODEL AC117)

Při prvním použití čidla musíte vložit přiloženou knoflíkovou baterii CR3032.

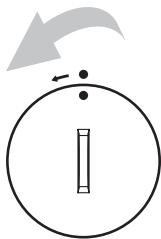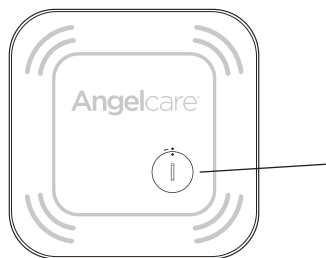

- 1) Sejměte kryt baterie pomocí mince, otočením ve směru šipky.
- 2) Vložte přiloženou baterii CR3032.
Poznámka: symbolem + nahoru.
- 3) Vraťte kryt baterie na místo a otočte jím do polohy dvou teček nad sebou.

2.2 – UMÍSTĚTE SNÍMACÍ PODLOŽKU NA ROŠT POSTÝLKY

DŮLEŽITÉ


Pokud dětská postýlka nemá rovné pevné dno, ale pružinový, nebo lamelový rošt (špruše), umístěte na dno pevnou vyrovnávací desku, abyste zajistili správné fungování systému. Vyrovnávací deska musí být větší, než plocha snímací podložky. Tedy rozměry nejméně 33 x 33 cm a tloušťku 6 mm

Snímací podložka funguje s jakoukoliv velikostí a typem matrace, s výjimkou paměťových penových matrací, dutých rámových matrací a vodních postelí.

Rovná pevná vyrovnávací deska udržuje Snímací podložku bez deformací, což jí umožňuje detekovat pohyby dítěte, i když je dítě na okrajích postýlky.



Překlička, sololit, lamino

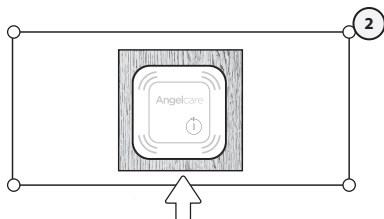

Snímací podložka

- 1) Vyjměte matraci z dětské postýlky.
- 2) Umístěte snímač do středu postele, **nápisem Angelcare® nahoru**. Pokud použijete podkladovou desku, měla by být umístěna uprostřed.
- 3) Vraťte matraci do postýlky.

! UPOZORNĚNÍ

Snímací podložka nesmí být používána dospělými nebo dětmi staršími 24 měsíců.


- Po uplynutí 24 měsíců věku dítěte by se neměla Snímací podložka používat (s ohledem na hmotnost dítěte). Vyjměte podložku z postýlky a uschovejte pro pozdější použití.
- Před prvním použitím: Zkontrolujte, zda je přístroj připraven k použití. Informace o tom, jak ověřit správnost instalace, naleznete v příručce.

KROK 3 - NASTAVENÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY

3.1 – VYBERTE MÍSTO PRO DĚTSKOU JEDNOTKU

DŮLEŽITÉ

Dětskou postýlku postavte nejlépe ke zdi, mimo průvan. Umístěte dětskou jednotku na rovnou a pevnou plochu tak, aby směřovala k postýlce a alespoň 1 metr od ní. Připojte adaptér k elektrické zásuvce, která je nejbližší k zařízení a je k ní snadný přístup.

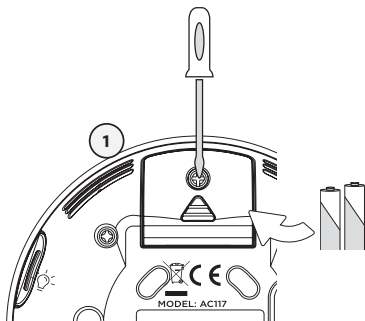


- 1) Sejměte kryt baterie a vložte 2 alkalické baterie typu AAA (nejsou součástí dodávky).

Poznámka:

Baterie slouží jako záloha napájení Dětské jednotky v případě výpadku proudu.



- 2) Dětskou jednotku umístěte na rovný a stabilní povrch tak, aby směřovala k postýlce a měla od ní odstup 1 m (mimo dosah dítěte)
- 3) Ověřte, že čidlo pohybu není posunuto.
- 4) Vložte matraci zpět do postýlky.

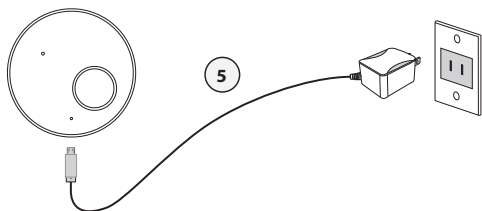


- 5) Připojte adaptér k dětské jednotce a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Poznámka: Při každém zapnutí Dětské jednotky se automaticky kalibruje interní teploměr, aby byla zajištěna přesnost. Proces trvá 30 sekund.

Ve výchozím nastavení je *indikátor teploty změnou barvy* vypnutý. Změnu lze provést nastavením Rodičovské jednotky.

DĚTSKÁ JEDNOTKA:

Kontrolka napájení
Indikace nízkého stavu baterie

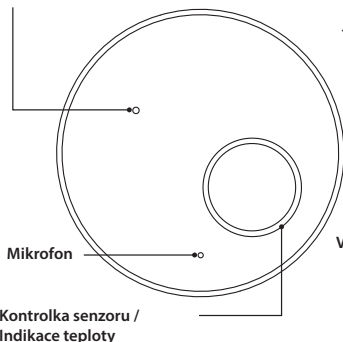

Mikrofon

Kontrolka senzoru /
Indikace teploty

Zapnutí nebo vypnutí
indikace teploty /
Vyhledání Rodičovské
jednotky

Příhrádka na
baterie

Pozastavení
snímání snímací
podložky

Přepínač
citlivosti snímání
podložky (čidla)

Vypínač

Reproduktor

Mikro-USB
konektor napájení

KROK 4 - ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

Angelcare® lze použít ve výchozím nastavení (továrním) i uživatelském nastavení.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ



Režim snímání:

Pohyb:

Zvuk:

ZAPNUTO

ZAPNUTO



Přenos zvuku (VOX):

ZAPNUTO



TIC funkce - tikání při pohybu:

VYPNUTO



VOX citlivost:

VYPNUTO

28-35 °C **Teplota:**

Celsius



Teplotní alarm:


Nastavené teploty pro spuštění alarmu:

VYPNUTO

vyšoká: 30 °C

nížká: 19 °C

ZAPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

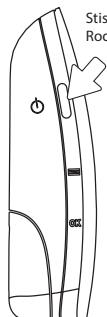


Stiskněte tlačítko napájení na
Rodičovské jednotce na **2 sekundy**..



Stiskněte tlačítko napájení
na Dětské jednotce
na **2 sekundy**..

POZNÁMKA:

Po zapnutí na displeji Rodičovské jednotky
bliká ikona (žádné spojení). Proces připojení je
dokončen během 30 sekund, ikona přestane
blikat a zobrazí se další informační značky.
Pokud do 30 sekund nepřestane blikat, musíte
vypnout obě jednotky a zapnout je znovu.

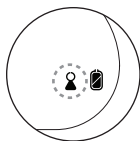

Pokud je Rodičovská jednotka zapnutá, zatímco Dětská jednotka není přítomná, nebo není spojení mezi oběma jednotkami navázáno

- bliká ikona **mimo dosah** na Rodičovské jednotce.
- Rodičovská jednotka 3x pípne každých 15 sekund.

DŮLEŽITÉ IKONY

Ikony teplotního alarmu:

Příliš teplo
Příliš zima

Ikony režimu detekce:
Indikuje, že je aktivována pohybová funkce

Jen pohyb →

Jen zvuk →

Pohyb, zvuk a "TIK" →

Pohyb a zvuk →

Pohyb a "TIK" →

VOX ikona: Indikuje, zda je dětská jednotka v režimu VOX

VOX zapnutý →

Stálý přenos zvuku — VOX vypnutý →

Indikace teploty

Ukazatel úrovně hlasitosti

Ikona připojení: Indikuje kvalitu spojení mezi Rodičovskou jednotkou a Dětskou jednotkou.

— Dobré spojení

— Střední kvalita spojení

— Špatné spojení

— Mimo dosah / Out-of-Range

Ikona stavu nabití baterie: baterie Rodičovské jednotky

— Plná

— 1/2

— Vybitá

— Animace nabíjení

KROK 5 - TESTOVÁNÍ A SEZNÁMENÍ S MONITOREM

Monitor Angelcare ® můžete použít s továrním nastavením, nebo s přizpůsobením dle svých preferencí.



Změny provedené v hlavní nabídce se projeví až po stisknutí tlačítka MENU/Exit pro **potvrzení**.

DŮLEŽITÉ

V režimu MENU, systém dočasně vypne zvuk mezi rodiči a dítětem.


5.1 – MENU A ZMĚNA NASTAVENÍ

Nabídku otevřete stisknutím a podržením tlačítka MENU Rodičovské jednotky. Položky nabídky se nabízejí ve smyčce. Krátkým stisknutím tlačítka **OK** přejdete na další možnost. Jakmile vyberete požadovanou možnost, stiskněte tlačítko Exit z menu, jinak budou změny ztraceny. Položky nabídky jsou seřazeny následovně:

STISKNUTÍ A PODRŽENÍ MENU: Pohyb	KROK 5.2
STISKNUTÍ OK 1x: POHYB A TIK	KROK 5.2
STISKNUTÍ OK 2x: ZVUK	KROK 5.5
STISKNUTÍ OK 3x: VOX	KROK 5.6
STISKNUTÍ OK 4x: TEPLOTA	KROK 5.7

NASTAVENÍ DETEKCE POHYBU

Umožňuje detekovat pohyby dítěte.

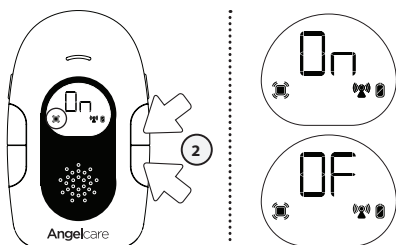


- 1) Stiskněte a **podržte** tlačítko **MENU**, dokud nezabliká ikona **detekce pohybu**.
- 2) Šípkami **NAHORU** a **DOLŮ** aktivujte (ON), nebo deaktivujte (OF) detekci pohybu.
Pro deaktivaci nejdříve aktivujte zvukový režim
- 3) Stisknutím **OK** přejdete k dalšímu nastavení funkcí, nebo stiskněte **EXIT** pro uložení volby.

NASTAVENÍ FUNKCE "TIK" (TIKÁNÍ)

Umožňuje detekci pohybu dítěte slyšet jako zvuk


DŮLEŽITÉ

Pro aktivaci funkce TIK musí být detekce pohybů zapnuta.

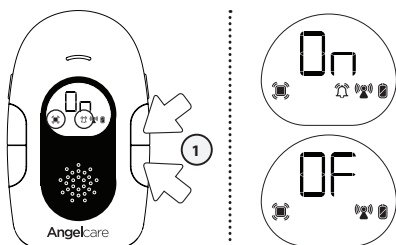

- 1) Stiskněte a **podržte** tlačítko **MENU** potom stiskněte tlačítko **OK**, dokud se nezobrazí 'ikona TIK'.
- 2) Šípkami **nahoru**, nebo **dolů**, aktivujte/deaktivujte funkci "TIK".
- 3) Stisknutím **OK** přejdete k dalšímu nastavení funkcí, nebo stiskněte **EXIT** pro uložení volby.


TESTOVÁNÍ SNÍMACÍ DESKY:

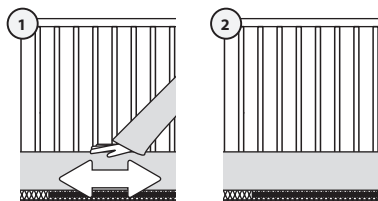

- 1) Lehce položte ruku na matraci.
Z Rodičovské jednotky zazní "TIK" každých 5 vteřin (pokud je TIK aktivní) a blikne ikona.
- 2) Sundějte ruku z matrace. Po 15 sekundách uslyšíte "TIK" před poplachem a 5 sekund později se spustí alarm pohybu.
- 3) Opakujte lehké pohyby rukou ve všech čtyřech rozech matrace.

POHYBOVÝ ALARM


- Pokud po 15 sekundách nebude detekován **žádný pohyb**, z Dětské jednotky uslyšíte jedno 'TIK' – **pre-alarm**.
- Pokud po dalších 5 sekundách stále není zjištěn žádný pohyb na matraci, Dětská jednotka a Rodičovská jednotka budou vydávat hlasité pípání – jedná se o pohybový **alarm**.
- Světlo Dětské jednotky bude blikat červeně.
- Ikona snímače a hladiny zvuku na Rodičovské jednotce budou blikat.

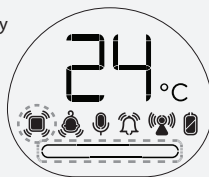

POKUD ALARM NEZNÍ


- Zabraňte kontaktu s dětskou postýlkou v době, kdy je monitoring pohybů v provozu.
- Přesuňte dětskou postýlku ke stěně.
- Nastavte úroveň citlivosti senzoru.
- Vypněte dětské kolotoče, ventilátory, hlasitou hudbu, nebo cokoli jiného, co může způsobovat **vibrace**.

ZASTAVENÍ ALARMU

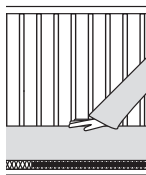


Položte ruku zpět na matraci

NEBO

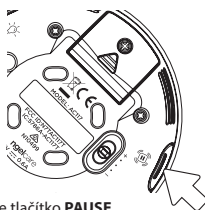

Stiskněte tlačítko **PAUSE** na Dětské jednotce.

NEBO

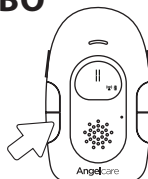


Stiskněte libovolné tlačítko na Rodičovské jednotce.

5.3 – POZASTAVENÍ A RESTART SNÍMACÍ PODLOŽKY (SENZORU)

Umožňuje vám pozastavit snímání, když odstraníte dítě z dětské postýlky, např. pro krmení nebo pohodlí.

Pozastavení/Restart snímání senzoru

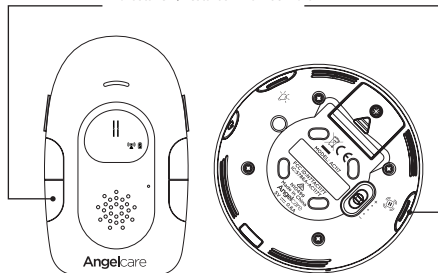

- 1) Na Rodičovské jednotce stiskněte a **podržte Pauza Sensor Pad** (tlačítko OK) po dobu nejméně 2 sekund
NEBO
Na Dětské jednotce stiskněte PAUZA.
- 2) Pro restart snímací podložky podržte na Rodičovské jednotce tlačítko PAUZA (Tlačítko OK).
NEBO
Na Dětské jednotce stiskněte PAUZA.

DŮLEŽITÉ

- Pokud nepozastavíte čidlo senzoru a pokud není detekován pohyb, po 20 sekundách se spustí alarm.
- Před opětovným uložením dítěte do dětské postýlky se ujistěte, že je snímací podložka **aktivní**.


5.4 – NASTAVENÍ CITLIVOSTI SNÍMACÍCH PODLOŽEK

Citlivost snímacího senzoru můžete nastavit tak, aby vyhovovala vašemu dítěti, postýlce a podmínkám uvedení do provozu. Nastavte vysokou citlivost pro novorozence, nebo nižší citlivost pro starší a těžší dítě. Vyšší citlivost je nutná i v případě silnější matrace. Posunutím tlačítka úrovně citlivosti přepnete mezi nízkou, střední a vysokou úrovní.

Pro dosažení optimálních výsledků nejprve použijte střední úroveň citlivosti a zvyšte nebo snižte pouze v případě potřeby.

POZNÁMKA:

Pokud dochází k falešným poplachům, upravte úroveň citlivosti.


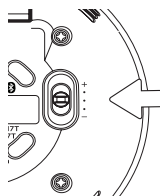


DŮLEŽITÉ

- Snímací podložka není určena pro dospělé, děti a kojence starší 24 měsíců.
- Až ukončíte používání snímací podložky, prosíme, deaktivujte pohybovou funkci, vyjměte ji z dětské postýlky a uložte ji pryč.

5.5 – ZVUK

AKTIVOVÁNÍ ZVUKU:

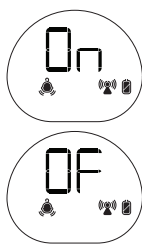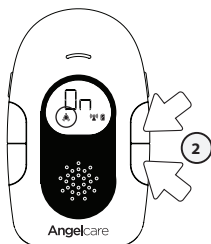

- 1) Stiskněte a podržte **MENU** a poté stiskněte tlačítko OK, dokud nezačne blikat ikona **přenosu zvuku**.
- 2) Šipkama **nahoru** nebo **dolů** funkci **zapněte** nebo **vypněte**.
- 3) Stiskněte tlačítko **OK** pro přechod na další nastavení nebo stiskněte tlačítko **EXIT** pro potvrzení volby.

TEST ZVUKU:

Požádejte někoho, aby promluvil do Dětské jednotky, nebo ji umístěte poblíž rádia, abyste zajistili zdroj zvuku.

DŮLEŽITÉ

Aby nedošlo ke zpětné vazbě (písknutí), držte obě jednotky alespoň 3 metry od sebe.


KDYŽ ZVUK NEZNÍ:

- Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapnuté.
- Zkontrolujte, zda jsou obě jednotky zapojeny do **funkčních** elektrických zásuvek.
- Zkontrolujte baterie v obou jednotkách (v případě potřeby je vyměňte nebo dobijte).
- Přiblížte Rodičovskou jednotku blíže k Dětské jednotce.

NASTAVENÍ HLASITOSTI ZVUKU




AKTIVOVAT TICHÝ REŽIM "MUTE"

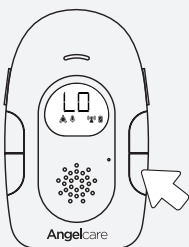

Stiskněte tlačítko **snížení hlasitosti**, dokud se neobjeví **LO**. Ikona blikajícího zvuku indikuje režim ztlumení MUTE.


ZAPNUTÍ REŽIMU 2-WAY KONVERZACE

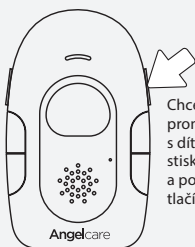

Chcete-li si promluvit s dítětem, stiskněte a podržte tlačítko..

5.6 – REŽIM ZVUKU VOX (AKTIVACE HLASEM) NEBO STÁLÝ PŘENOS (VOX VYPNUTÝ)


Umožňuje nastavit způsob přenášení zvuku: **VOX** (přenos aktivuje hlasitost zvuku, na základě zvolené úrovně citlivosti mikrofону), nebo **kontinuální** (stálý příjem a přenos zvuku).

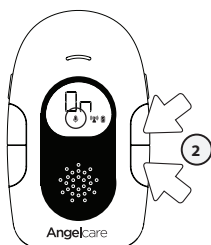

- 1) Stiskněte a podržte **MENU** a poté tiskněte tlačítko **OK**, dokud ikona VOX  nezačne blikat.
- 2) Šipkami **nahoru** nebo **dolů** funkci VOX zapnete, nebo vypnete.
- 3) Tlačítkem **OK** přejdete na další nastavení, nebo kliknutím na tlačítko **Exit** potvrďte vybranou možnost.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI (VOX):


Citlivost mikrofону je nastavitelná. Systém tak bude přenášet zvuk pouze v případě, že dosáhne zadané úrovně.

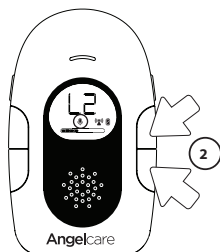

- 1) Když je přenos hlasu zapnutý (VOX), stiskněte a podržte tlačítko **MENU** a poté stiskněte tlačítko **OK**, dokud ikona VOX  na displeji nezačne blikat.
- 2) Šipkami **nahoru** nebo **dolů** vyberte požadovanou úroveň citlivosti mikrofону.
- 3) Tlačítkem **OK** přejdete na další nastavení, nebo kliknutím na tlačítko **Exit** potvrďte vybranou možnost.


5.7 – TEPLOTA

VOLBA JEDNOTEK TEPLoty - CELSIUS NEBO FAHRENHEIT:

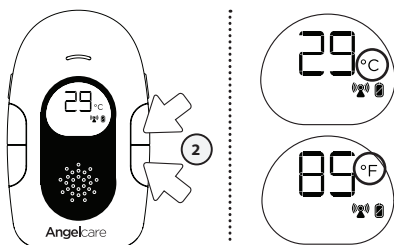

- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** a poté stiskněte tlačítko **OK**, dokud ikona °C / °F nebude blikat.
- 2) Šípkami **nahoru** nebo **dolů** vyberte stupnici Celsiovu, nebo Fahrenheita.
- 3) Tlačítkem **OK** přejdete na další nastavení, nebo kliknutím na tlačítko **Exit** potvrďte vybranou možnost.

TEPLOTNÍ ALARM - ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

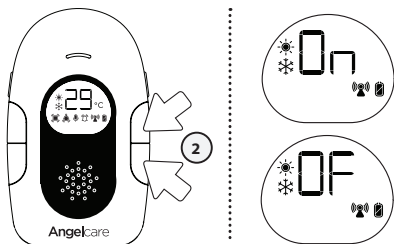


- 1) Stiskněte a podržte tlačítko **MENU** a poté stiskněte tlačítko **OK**, dokud ikona **Indikace teplot** ☀❄ **teplotního alarmu**, nezačne blikat.
- 2) Šípkami **nahoru** nebo **dolů** zapnete/ vypnete teplotní alarm.
- 3) Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte svou volbu a nastavte teplotní rozsah následovně.


NASTAVENÍ TEPLOTNÍHO ROZSAHU:

POZNÁMKA:

Chcete-li nastavit teplotní rozsah, zapněte teplotní alarm viz výše.

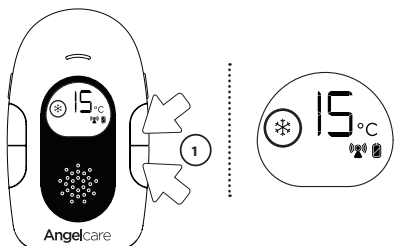

- 1) Bliká ikona **nízké teploty** ❄
Nastavte hodnotu pro alarm nízké teploty (od 5 do 19 °C) tisknutím šipek **nahoru** nebo **dolů**.
- 2) Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte svou volbu a pokračujte v nastavení alarmu vysoké teploty.

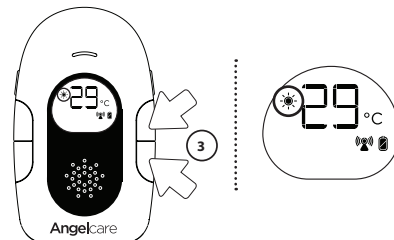

- 3) Bliká ikona **vysoké teploty** ☀
Nastavte hodnotu pro alarm vysoké teploty (od 22 do 37 °C) tisknutím šipek **nahoru** nebo **dolů**.
- 4) Tlačítkem **OK** přejdete na další nastavení, nebo kliknutím na tlačítko **Exit** potvrďte vybranou možnost.

..... Rozsah nízkých teplot je 5 ° až 19 °C
..... a rozsah vysokých teplot je 22 ° až 37 °C.


TEPLOTNÍ ALARM

- Alarm se zapne, když teplota dosáhne nastavené maximální nebo minimální teploty.
- Rodičovská jednotka pípne 3x každých 5 sekund, pokud teplota překročí jeden z nakonfigurovaných rozsahů. Odpovídající ikona bliká na rodičovské jednotce, aby vás informovala.

KROK 6 - DALŠÍ FUNKCE

6.1 – TEPLOTNÍ INDIKÁTOR NA DĚTSKÉ JEDNOTCE

Při této volbě teplotní indikátor Dětské jednotky změní barvu, když je měřená teplota pod nebo stoupá nad zadanými hodnotami. Symbol teploty bude **červený** místo výchozí **bílý**, pokud teplota stoupne nad horní nastavenou hodnotu, nebo je **modrá**, pokud klesne pod dolní nastavenou hodnotu.

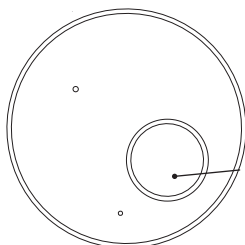

- **Červená** – Teplota v místnosti je příliš vysoká.
- **Modrá** – Teplota v místnosti je příliš nízká.
- **Bílá** – Teplota v místnosti je vyhovující.

6.2 – MIMO DOSAH — OUT-OF-RANGE

Zařízení má alarm **mimo dosah**, který vás informuje, když jednotky vzájemně nekomunikují. Stav **mimo dosah** může být způsoben vzdáleností jednotek, nebo fyzickými rušivými vlivy.

DOSAH:

Otevřený terén (otevřený bezbariérový prostor): až 230 metrů.


ALARM MIMO DOSAH

- Alarm se aktivuje, když spolu jednotky nekomunikují.
- Rodičovská jednotka vydá každých 15 sekund tříkrát pípnutí.
- Ikona **mimo dosah** bude blikat na obrazovce.



DŮLEŽITÉ

Pokud vypnete Dětskou jednotku, zazní zvuk **mimo dosah**. Znovu zapněte Dětskou jednotku a aktivujte spojení.

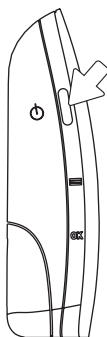

Chcete-li Rodičovskou jednotku vypnout, stiskněte na **2 sekundy**.

NEBO



Zapněte Dětskou jednotku.

6.3 – FUNKCE VYHLEDÁVÁNÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY

Umožňuje nalezení Rodičovské jednotky.



VYHLEDÁNÍ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY:

Stiskněte a **přidrže** tlačítko "teplotní světlo" na boku dětské jednotky. Rodičovská jednotka bude pípat.


CHCETE-LI PÍPÁNÍ DEAKTIVOVAT:

Stiskněte libovolné tlačítko na Rodičovské jednotce, nebo na tlačítko Vyhledat Rodičovskou jednotku na jednotce Dětské.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

MANIPULACE S DOBÍJECÍMI BATERIEMI

- Akumulátory nabíjejte v jednotce, vždy 10 hodin před prvním použitím.
- Chcete-li maximalizovat výdrž baterií, měli byste je občas zcela vybit. Výkon baterií se může snížit, pokud jsou neustále nabíjeny. Pokud Rodičovskou jednotku nepoužíváte, vypněte ji.
- Vybité baterie mohou zhoršit výkon monitoru. Pokud nejste spokojeni s výkonem vaší Rodičovské jednotky, vyměňte dobíjecí baterie (2 dobíjecí baterie NiMH).
- Doporučuje se vyměnit baterie každých šest měsíců.

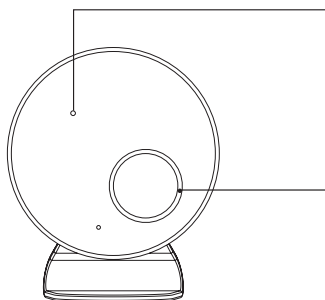

Kontrolka napájení Indikace nízkého stavu baterie


Bliká zeleně	Dětská jednotka je k dispozici v pohotovostním režimu
Bliká žlutě	Baterie dětské jednotky jsou slabé
Bliká červeně	Přístroj je zapnutý

Kontrolka snímání desky Indikace teploty


Bliká červeně	Není detekován pohyb
Bliká bíle	Monitoring je pozastaven
Bliká modře	Došlo ke ztrátě spojení mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou
Svítil červeně	Teplota v místnosti je příliš vysoká
Modré světlo	Teplota v místnosti je příliš nízká
Svítil bíle	Teplota v místnosti je optimální

ZTRÁTA SPOJENÍ MEZI RODIČOVSKOU JEDNOTKOU A DĚTSKOU JEDNOTKOU

- Pokud je spojení ztraceno, nejdříve přesuňte Rodičovskou a Dětskou jednotku blíže k sobě a zajistěte, že jsou obě jednotky zapnuté, aby se připojení resetovalo. Pokud jste stále odpojeni a nevidíte varování *mimo dosah*, proveďte postup opětovného připojení, který je popsán níže:

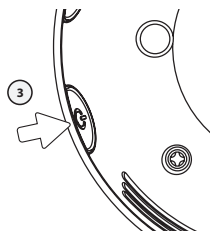

- Vypněte obě jednotky
- Zapněte Dětskou jednotku
- Stiskněte hlavní vypínač Dětské jednotky ještě **čtyřikrát za sebou**.

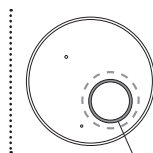


Indikátor senzoru na Dětské jednotce rychle bliká zeleně (jednotka je v režimu připojování).

ZELENÁ




- Zapněte Rodičovskou jednotku. Ikona mimo dosah (📶) bude blikat (indikuje, že Dětská jednotka je v režimu připojování).
- Stiskněte a podržte tlačítko **mikrofonu** na Rodičovské jednotce, dokud neuslyšíte pípnutí.
- Stiskněte tlačítko **OK** na Rodičovské jednotce. Ikona mimo dosah (📶) bliká rychleji, což znamená, že Rodičovská jednotka je v režimu připojování.

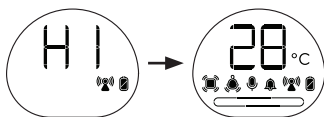


Rodičovská jednotka zobrazí během procesu opětovného připojování ikonu H1-H2. Opětovné připojení je úspěšné, pokud Rodičovská jednotka zobrazuje běžné zobrazení displeje.

ZTRÁTA SPOJENÍ DĚTSKÉ JEDNOTKY S BEZDRÁTOVOU SNÍMACÍ PODLOŽKOU (MODEL AC117)

- Pokud je spojení ztraceno, nejdříve přesuňte Rodičovskou a Dětskou jednotku blíže k sobě a zajistěte, že jsou obě jednotky zapnuté, aby se připojení resetovalo. Pokud jste stále odpojeni, proveďte postup opětovného připojení, který je popsán níže. Během provozu se ujistěte, že v místnosti není žádný jiný bezdrátový senzor.

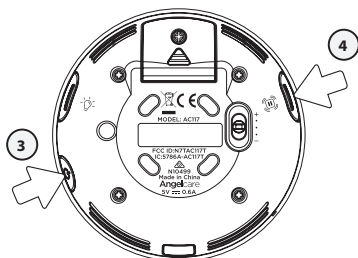


- 1) Vypněte obě jednotky.
- 2) Vyjměte a znovu vložte baterii snímací podložky.
- 3) Zapněte Dětskou jednotku podržením vypínače na 2 sekundy.

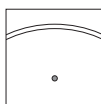

Indikátor napájení Dětské jednotky svítí zeleně.

- 4) Stiskněte a podržte tlačítko PAUZA na Dětské jednotce po dobu 3 sekund.

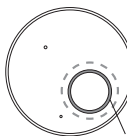

Indikátor Snímací podložky na Dětské jednotce bliká modře.

MODRA

- Dokončete operaci opětovného připojení do 30 sekund.
- Opětovné připojení je úspěšné, když z Dětské jednotky zazní potvrzovací zvuk.

POZNÁMKA:

Během provozu se ujistěte, že v místnosti není žádný jiný bezdrátový senzor.

FALEŠNÉ POPLACHY

- Vypněte dětskou jednotku.
- Ujistěte se, že mezi matrací a snímací podložkou není ložní prádlo.
- Pokud je dno postýlky pružinové, lamelové, nebo prohnuté, vytvořte novou rovinu – uložte na dno překližku o tloušťce nejméně 6 cm, rozměru 33 cm x 33 cm a na ni umístěte snímací podložku.
- Zkontrolujte, zda je snímací podložka umístěna v souladu s pokyny pro uvedení do provozu.
- Možná budete muset zvýšit citlivost snímání (viz krok 5.4).

ALARM NEZNÍ

- Zabraňte kontaktu s dětskou postýlkou, když je monitor zapnutý.
- Umístěte dětskou postýlku do blízkosti zdi, abyste zabránili snímání pohybů z prostoru mimo postýlku (pohyby podlahy).
- Vypněte mechanické hračky, ventilátory, hlasitou hudbu nebo cokoli jiného, co může způsobit vibrace (pračky, ždímačky).
- Možná budete muset snížit citlivost snímání (viz krok 5.4).

NESVÍTÍ KONTROLKA NAPÁJENÍ NA DĚTSKÉ JEDNOTCE

- Zkontrolujte připojení nebo jinou elektrickou zásuvku.
- Zapněte Dětskou jednotku podržením vypínače po dobu 2 sekund.

SLABÝ PŘÍJEM

- Přesuňte jednotky blíže k sobě.
- Změňte polohu jedné, nebo obou jednotek.
- Umístěte jednotky na rovnou plochu tak, aby se k nim dítě nedostalo.
- Vyměňte baterie, nebo dobijte Rodičovskou jednotku.

STATICKÝ ŠUM, ZKRESLENÍ, RUŠENÍ (Z JINÝCH DĚTSKÝCH MONITORŮ, BEZDRÁTOVÝCH TELEFONŮ, PŘIJÍMAČŮ PTT ATD.)

- Otočte Rodičovskou jednotku, nebo ji odneste od zdroje rušení.

RUŠENÍ (RODIČOVSKÁ JEDNOTKA VYDÁVÁ HLASITÝ ŠUM A ZVUK)

- Umístěte jednotky dál od sebe (nejméně 3 m od sebe).
- Snízte hlasitost Rodičovské jednotky.

DISPLEJ RODIČOVSKÉ JEDNOTKY JE ČERNÝ (RODIČOVSKÁ JEDNOTKA JE VYPNUTÁ)

- Zapněte Rodičovskou jednotku stisknutím a podržením vypínače..
- Vyměňte baterie za nové, nebo dobijte Rodičovskou jednotku.

KONTROLKA POHYBU BLIKÁ ČERVENĚ (SNÍMAČ POHYBU NEDETEKUJE POHYB)

- Dbejte na to, aby mezi matrací a snímací podložkou s čidlem nebyly žádné lůžkoviny.
- Snímací podložka (senzor) musí být na rovině a stabilní. Pokud je dno postýlky pružinové, lamelové, nebo prohnuté, umístěte na dno vyrovnávací desku o tloušťce nejméně 6 cm a šířce 33 cm x 33 cm. Teprve na ni umístěte snímací podložku.
- Zkontrolujte, zda je snímací podložka umístěna podle informací o nastavení.
- Možná budete muset zvýšit citlivost snímání (viz krok 5.4).

BEZ NAPÁJENÍ

- Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte baterie.
- Stiskněte tlačítko zapínání jednotky na 2 sekundy a zapněte jednotku.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Angelcare® zaručuje původnímu majiteli tohoto výrobku, že Angelcare® monitor je bez jakýchkoli vad materiálu a zpracování po dobu trvání záruční doby (viz níže uvedená záruční tabulka pro určení záruky pro vaši zemi). Pokud tento monitorovací systém nefunguje správně, pokud je používán v souladu s běžnými podmínkami a během záruční doby, Angelcare® bude produkt opravovat nebo vyměňovat dle našeho uvážení zdarma. Kontaktujte prosím svého místního distributora, aby ověřil záruční a záruční dobu.

K produktu musí být přiložen doklad o koupi, nebo jiný doklad prokazující, že monitorovací systém spadá do záruční doby. Angelcare® uhradí náklady na opravu nebo výměnu produktu a zaslání zpět k vám.

Tato záruka se nevztahuje na výrobek, který byl poškozen v důsledku nesprávné údržby, nehody, nesprávného napájecího napětí nebo jakékoli jiné formy zneužití. Záruka je také neplatná, pokud vlastník výrobku jakýmkoli způsobem opraví nebo modifikuje. Angelcare® neručí za žádné náhodné nebo následné škody s ohledem na tento výrobek. Záruka rovněž vylučuje jakoukoli odpovědnost, která je uvedena výše. Žádná jiná záruka se neposkytuje.

Tato záruka se nevztahuje na výrobky a příslušenství, které nejsou Angelcare®, ani na problémy, které vyplývají z používání, které nejsou v souladu s pokyny k produktu, nedodržení pokynů k produktu nebo problémy způsobené použitím příslušenství, díly nebo součásti, které nebyly dodány společností Angelcare.

ZÁKONNÁ PRÁVA SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LÍŠÍ. NĚKTERÝCH ZEMÍCH NEDOVOLÍTE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PROTO SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

NEJSME ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM ODPOVĚDNI ZA JAKÝKOLI VÝSLEDEK VYPLYVÁJÍCÍ Z POUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU.

POZOR! TENTO PŘÍSTROJ ANGELCARE® JE HYGIENICKÝ VÝROBEK. NEBERTE JEJ ZPĚT DO OBCHODU. MÁTE-LI NĚJÁKÉ DOTAZY NEBO POTŘEBUJETE POMOC, OBRÁTE SE NA SVÉHO DISTRIBUTORA PŘED VRÁCENÍM PRODUKTU DO OBCHODU

ZÁRUČNÍ LHŮTY

Severní Amerika	1 rok
Jižní Afrika, Rusko	1 rok
EU	2 roky

United States and Canada:

Please contact us at: angelcare@cdcinc.ca

Other countries:

Find your local distributor by visiting our website: international.angelcarebaby.com.

Česká republika: podpora@angelcare.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Dosah:

Otevřený terén (otevřený bezbariérový prostor):

- Mezi rodičovskou jednotkou a dětskou jednotkou: až 230 metrů.
- Mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou: až 6 m.

Napájení:

2 kusy AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky), nebo 100–240 V AC/5 V DC adaptér pro Dětskou jednotku.
2 kusy AAA dobíjecí baterie a 100–240 V AC/5 V DC adaptér pro Rodičovskou jednotku.

1 kus 3 V CR3032 baterie (připojeno) k desce bezdrátového senzoru (snímací podložce)

Pozor: Pro zmiňování rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte výrobek dešti nebo vlhkosti.

Nebezpečí požáru, pokud jsou baterie nesprávně vyměněny. Baterie dodávané pro Rodičovskou jednotku jsou 2 akumulátory AAA NiMH, vyrobené společností GPI INTERNATIONAL LIMITED (GN60AAAHC, 1.2V 600mAh). Používejte pouze náhradní baterii doporučenou společností Angelcare. Chcete-li získat informace o náhradních bateriích, kontaktujte prosím zákaznický servis společnosti Angelcare: www.angelcarebaby.com nebo se obraťte na svého místního distributora. Uchovávejte všechny baterie mimo dosah dětí.

Baterie:

- Nepoužívejte nemicejte staré a nové baterie.
- Nepoužívejte nemicejte alkalické baterie a dobíjecí baterie.

Upozornění: použití nesprávného typu baterie může způsobit požár.

Prenos:

- Mezi Rodičovskou jednotkou a Dětskou jednotkou probíhá na frekvenci 1.88 – 1.9 GHz pro Evropu / Asii / Afriku / Austrálii.
- Mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou probíhá na frekvenci 2.4 GHz pro Evropu / Asii / Afriku / Austrálii

Maximální hodnoty RF signálu:

- 24 dBm (250 mW) mezi Rodičovskou jednotkou a Dětskou jednotkou;
- 20 dBm (100 mW) mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou

RF kanálů mezi Rodičovskou jednotkou a Dětskou jednotkou: 10
RF kanálů mezi Dětskou jednotkou a snímací podložkou: 79

Společnost Angelcare Monitors Inc. tímto prohlašuje, že tento Baby Monitor je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. Úplné znění prohlášení EC/CE prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://international.angelcarebaby.com/declaration-of-conformity>

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symboly přeskřítnutého odpadkového koše znamenají, že v souladu s místními zákony a předpisy by výrobek a/nebo jeho baterie nebo akumulátory neměly být uváděny do komunálních kolektorů. Jakmile produkt nebo položka nebo baterie dosáhnou konce životnosti, vezměte ji do sběrného místa určeného místními orgány. Selektivní sběr a recyklace odpadů mohou pomoci šetřit přírodní zdroje a chránit zdraví a životní prostředí. Informace o výjimtu baterií a akumulátorů naleznete v uživatelské příručce.

ERP-SHODA

POUŽÍVEJTE POUZE ANGELCARE® ZNAČKOVÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁSLEDUJÍCÍHO MODELU:
EVROPSKÁ UNIE (VČETNĚ NĚMECKA) – K055050060G
VELKÁ BRITÁNIE – K055050060B

Podívejte se na značku shody, která je specifická pro toto zařízení.



DODATEK: INFORMACE O EXPOZICI RÁDIOVÝM VLNÁM A O ALTERNATIVNÍM ABSORBOVANÉM VÝKONU (SAR)

Návrh Rodičovské jednotky je v souladu se stávajícími předpisy o vystavení rádiovým vlnám. Tyto předpisy jsou založeny na vědeckých pokynech, které stanoví bezpečnostní bariéry k zajištění bezpečnosti všech, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Tyto pokyny měří expozici rádiovým vlnám na základě specifické míry absorpce (SAR). Testy na SAR byly prováděny standardními metodami, přičemž rodičovská jednotka používala všechna frekvenční pásma, která musí přenášet nejvyšší přípustný výkon. Maximální úroveň SAR doporučená mezinárodní Komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg, měřeno na 10 g tkáně. Úroveň SAR měřené rodičovskou jednotkou jsou následující: při přímém styku s tělem dosáhla emise 1,8 GHz DECT v 0,042 W/kg (10 g). Emise 1,8 GHz DECT vyústila v 0,021 W/kg (10 g) výkon před obličejem. Podle těchto výsledků je tento přístroj v souladu s pokyny pro vystavení rádiovým vlnám při umístění 0 mm nebo před obličejem.

www.angelcarebaby.com
www.angelcare.cz